


คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/และการผลิต

รหัสสินค้า CH-13-FS-035

ชื่อสินค้า แปรงยาว 3.5 มม.*130 ซม. 2 ปลาย

ลักษณะการใช้งาน แปรงขัดล้างแบบใช้ครั้งเดียว ประกอบด้วย
แปรงยาว 2 ปลาย ด้ามอ่อน 1 ด้าม

มาตรฐาน และวัสดุการผลิต ผลิตในห้องสะอาดของโรงงานผลิต
วัสดุทางการแพทย์ ตัวแปรงทำด้วย โพลีโพรไพลีน
(Polypropylene) และไนลอน 6/12

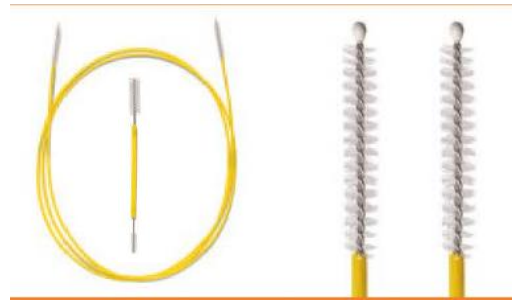

GMDN Code: 10500-แปรงขัดล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และการผ่าตัด

วัตถุประสงค์การใช้งาน ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง flexible scopes เช่น
Gastrosopes, Colonoscopes เป็นต้น

ข้อบ่งใช้


แปรงยาว 3.5 มม.*130 ซม. 2 ปลาย

พร้อมด้วยแปรงขัดล้างวาล์ว และแปรงขัดล้างพื้นผิวภายนอก

ข้อควรระวังการใช้งาน

- ผลิตกันท้อออกแบบเพื่อใช้ขัดล้างหลอดท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2.0-3.4 มม. เท่านั้น
- ผลิตกันท้อออกแบบให้ใช้สำหรับทำความสะอาดกล้องส่องมีความยาวน้อยกว่า 120.0 ซม.
- ควรสอดหัวแปรงเข้าไปในช่องของกล้องส่อง แล้วดึงผ่านในทิศทางเดียวจนตัวแปรงหลุดออกทั้งหมด จากนั้นทำความสะอาดคราบปนเปื้อนออกก่อนจึงสอดทำความสะอาดกล้องส่องอีกครั้ง ดังภาพประกอบด้านล่าง

1. สอดแปรงเข้าสู่ช่องกล้องส่องจนหลุดออกทั้งหมด
2. จากนั้น ดึงแปรงทั้งด้ามออกแล้ว ทำความสะอาด
คราบปนเปื้อนออกจากหัวแปรง
3. สอดแปรงเข้าสู่ช่องกล้องส่องตามขั้นตอน
ที่ 1 อีกครั้ง หรือตามข้อบังคับของ
แต่ละประเทศ เช่น AS4187

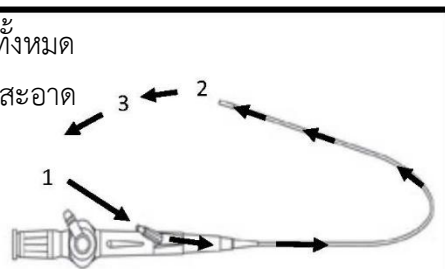

ข้อควรระวังสำคัญ

โปรดปฏิบัติตามวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง ข้อบ่งใช้ตาม
เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะทั่วไปเท่านั้น การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น และ
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น AS4187 เป็นต้น

สินค้าจาก ประเทศออสเตรเลีย



สิทธิความปลอดภัยของทุกคน
SAFETY RIGHT
FOR EVERYONE

