

คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/และการผลิต

รหัสสินค้า


CH-24-FS-050

ชื่อสินค้า

แปรงยาว 5 มม.*240 ซม. 2 ปลาย

ลักษณะการใช้งาน แปรงขัดล้างแบบใช้ครั้งเดียว ประกอบด้วย

- แปรงยาว 2 ปลาย ด้ามอ่อน 1 ด้าม
- แปรงแยงขัดล้างวาล์ว 1 ด้าม
- แปรงขัดล้าง 2 หัว 1 ด้าม

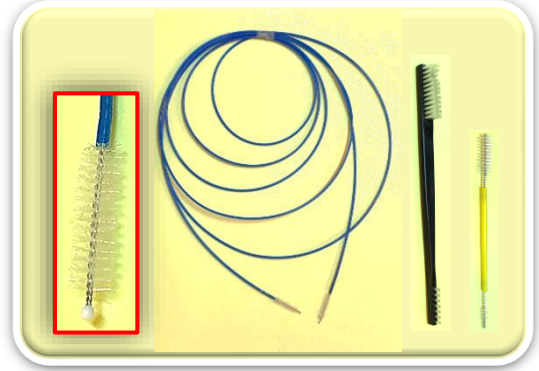

มาตรฐาน และวัสดุการผลิต ผลิตในห้องสะอาดของโรงงานผลิต

วัสดุทางการแพทย์ ตัวแปรงทำด้วย โพลีโพรไพลีน (Polypropylene) และไนลอน 6/12

GMDN Code: 10500-แปรงขัดล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และการผ่าตัด

วัตถุประสงค์การใช้งาน ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง flexible scopes เช่น Gastroscopes, Colonoscopes เป็นต้น

ข้อบ่งใช้


แปรงยาว 5 มม.*240 มม. 2 ปลาย

พร้อมด้วยแปรงขัดล้างวาล์ว และแปรงขัดล้างพื้นผิวภายนอก

ข้อควรระวังการใช้งาน

- ผลิตกันท้อออกแบบเพื่อใช้ขัดล้างหลอดท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3.5-5.0 มม. เท่านั้น
- ผลิตกันท้อออกแบบให้ใช้สำหรับทำความสะอาดกล้องส่องมีความยาวน้อยกว่า 238.0 ซม.
- ควรสอดหัวแปรงเข้าไปในช่องของกล้องส่อง แล้วดึงผ่านในทิศทางเดียวจนตัวแปรงหลุดออกทั้งหมด จากนั้นทำความสะอาดคราบปนเปื้อนออกก่อนจึงสอดทำความสะอาดกล้องส่องอีกครั้ง ดังภาพประกอบด้านล่าง

1. สอดแปรงเข้าสู่ช่องกล้องส่องจนหลุดออกทั้งหมด
2. จากนั้น ดึงแปรงทั้งด้ามออกแล้ว ทำความสะอาดคราบปนเปื้อนออกจากหัวแปรง
3. สอดแปรงเข้าสู่ช่องกล้องส่องตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง หรือตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ เช่น AS4187

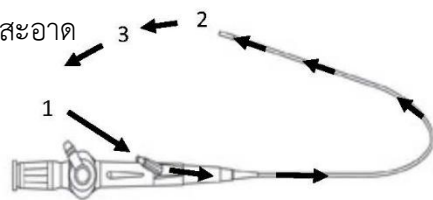

ข้อควรระวังสำคัญ

โปรดปฏิบัติตามวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง ข้อบ่งใช้ตามเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะทั่วไปเท่านั้น การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น AS4187 เป็นต้น

สินค้าจาก ประเทศออสเตรเลีย



สิทธิความปลอดภัยของทุกคน
SAFETY RIGHT
FOR EVERYONE

